

クラウド名／対応機種	接続方法
<p>3 Mコネクトセンター</p> <p>【対応機種】 3 M社 True Definition</p>	<p>3 Mジャパン社へ送信先追加（「株式会社シケン」）をご依頼くださいますようお願いいたします。</p> <p>3 Mコネクトセンターとの接続が完了しましたら、口腔内データを送信ください。</p> <p>※「コネクト接続設定」や操作の詳細については、販売業者のサポート担当の方までお問い合わせください。</p>
<p>3 Shape communicate</p> <p>【対応機種】 3 Shape社 Trios</p>	<p>送信先追加（「アカウント名：shiken1」）でラボ検索を行い、当社宛にリクエストを送って頂きますようお願いいたします。リクエストを承認いたしますので、コネクト接続完了後、口腔内データをご送信ください。</p> <p>※「コネクト接続設定」や操作の詳細については、販売業者のサポート担当の方までお問い合わせください。</p>
<p>Aadva Xchange</p> <p>【対応機種】 G C社 Aadva IOS 100</p>	<p>G C社へ送信先追加（「株式会社シケン」）をご依頼くださいますようお願いいたします。</p> <p>Aadva Xchangeとの接続が完了しましたら、口腔内データを送信ください。</p> <p>※「コネクト接続設定」や操作の詳細については、販売業者のサポート担当の方までお問い合わせください。</p>
<p>コネクトケースセンター</p> <p>【対応機種】 Dentsply Sirona社 CEREC</p>	<p>コネクトケースセンターにログインの上、「株式会社シケン」でラボ検索を行い、お気に入りラボ登録設定を行ってください。その後、口腔内データを送信ください。</p> <p>※「コネクト接続設定」や操作の詳細については、販売業者のサポート担当の方までお問い合わせください。</p>
<p>G-Link</p> <p>【対応機種】 GeoMedi社 GOS（G-OralScan） Shining 3D社 A-OralScan</p>	<p>G-Linkにログインの上、「株式会社シケン」でラボ検索を行い、当社宛にリクエストを送って頂きますようお願いいたします。リクエストを承認いたしますので、コネクト接続完了後、口腔内データをご送信ください。</p> <p>※「コネクト接続設定」や操作の詳細については、販売業者のサポート担当の方までお問い合わせください。</p>
<p>Medit Link</p> <p>【対応機種】 Medit社 Medit YOSHIDA社 コエックス</p>	<p>アカウント名「株式会社シケン高松技工所」でパートナー検索を行ってください。株式会社シケン宛にリクエストを送って頂きましたらリクエスト承認いたしますので、コネクト接続完了後、口腔内データを送信ください。</p> <p>※「コネクト接続設定」や操作の詳細については、販売業者のサポート担当の方までお問い合わせください。</p>
<p>Yコネクト</p> <p>【対応機種】 YOSHIDA社 Trophy</p>	<p>YOSHIDA社へ「株式会社シケン」で送信先追加のご依頼を行ってください。Yコネクト接続完了後、口腔内データを送信ください。</p> <p>※「コネクト接続設定」や操作の詳細については、販売業者のサポート担当の方までお問い合わせください。</p>
<p>マイアイテロ</p> <p>【対応機種】 インビザライン・ジャパン社 iTero</p>	<p>インビザライン・ジャパン社へ「株式会社シケン」で送信先追加のご依頼を行ってください。</p> <p>補綴モード設定およびコネクト接続完了後、「SHIKEN CORPORATION」を選択して口腔内データを送信してください。</p> <p>※補綴モード設定がお済でないiTeroユーザー様はインビザライン・ジャパン社への手配が別途必要になります。</p> <p>※当社の送信先名は英語表記となっています。</p> <p>※「コネクト接続設定」や操作の詳細については、販売業者のサポート担当の方までお問い合わせください。</p>
<p>その他、クラウドや送信方法について</p>	<p>口腔内スキャナーで採得された口腔内データ（DCM・STLファイルなど）を、まとめてZIP圧縮していただき、メール添付（digital@shiken.biz）の上、送信いただくことも可能です。</p> <p>※「コネクト接続設定」や「口腔内データのエキスポート」「STLデータへの変換方法」など操作の詳細については、それぞれのメーカーまたは販売業者へお問い合わせください。</p>